

Tipps zum exakten Maßnehmen für Kompressionsärmel bei der Ödem- und Narbenversorgung




Legen Sie diese Arbeitsmittel bereit:

- Juzo® Rollmaßband
- Juzo® Tyvek-Fingermaßband
- Juzo® Fingerlineal
- Juzo® Maßblock für Kompressionsärmel
- Hautmarkierungsstift (z.B. Kajal- oder Fettstift)

Julius Zorn GmbH
Postfach 1280, D-86543 Aichach
Juliusplatz 1, D-86551 Aichach

info@juzo.de
www.juzo.com

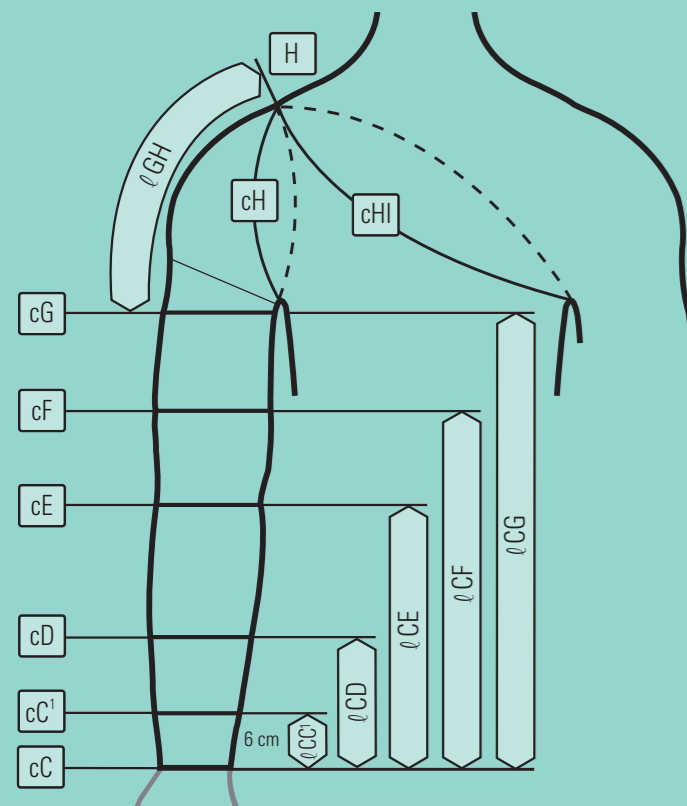

Wichtige Hinweise zum exakten Maßnehmen für Juzo® Kompressionsärmel

- Der Arm sollte ödemfrei bzw. maximal entstaut sein.
- Besonders bei Ödem-Patienten den Messvorgang schnell und zügig durchführen, ggf. bei Verzögerungen den Arm hochlagern. Trägt der Patient einen Kompressionsverband, so ist dieser erst direkt vor Ermitteln der Maße zu entfernen.
- Bei ausgeprägten Ödemen sollten bestimmte Umfangmaße unter Zug gemessen werden.
- Kompressionsärmel und Kompressionshandschuhe werden separat voneinander gefertigt und zweiteilig getragen, um ein leichtes An- und Ausziehen zu ermöglichen.
- Im Bereich der Überlappung von Kompressionshandschuh und -ärmel ist das Gestrick kompressionsreduziert, um einen gleichmäßigen Druckverlauf zu gewährleisten.



1 | Maß „cC“
befindet sich am Handgelenk und wird distal vom Handgelenkknöchel gemessen. Bitte „ohne Zug“ messen.



2 | Maß „cC“
wird bei Erwachsenen als Fixmaß 6 cm oberhalb „cC“ gemessen. Bei Kinderversorgungen kann dieses Maß individuell kürzer gewählt werden.



3 | Maß „cD“
befindet sich ca. Mitte des Unterarms. Bei ungewöhnlichen anatomischen Proportionen am Unterarm sollte ein zusätzliches Zwischenmaß mit Umfang und Länge angegeben werden (z. B. „cD“).



4 | Maß „cE“
wird bei locker hängendem, leicht angewinkeltem Arm in der Mitte des Ellenbogens gemessen. Bei Anwinkeln des Armes sollte der Kompressionsärmel gut sitzen, aber nicht einschneiden.



5 | Maß „cF“
befindet sich mittig des Oberarmes. Bei Ödemversorgung ggf. „auf Zug“ messen.



6 | Maß „cG“
wird in Höhe der Achselhöhle gemessen. „cG“ ist das Abschlussmaß für „lCG“-Kompressionsärmel und wird bei Ödemversorgung ggf. „auf Zug“ gemessen.



7 | Maß „cH“
wird senkrecht über der Achselhöhle auf der Schulter, auf dem sogenannten Schulterreck, ermittelt. Dieses Maß ist zu nehmen für:
– Boleroform zur doppelseitigen Versorgung
– Thoraxbandage



8 | Maß „cHI“
ist als Umfang von Messpunkt „H“ aus unter der gegenüberliegenden Achsel hindurch zurück zu „H“ zu messen. Das Maß wird benötigt bei Schulter-Haltegurt und Boleroform.



Längenmaße
Die Längenmaße werden ab „C“ gemessen. Eine Ausnahme bildet das Längenmaß „lGH“.



Maß „lGH“
ist von der Mitte der Arm-Außenseite zu nehmen.

Ausführung A
Kompressionsärmel CH mit Haftuntertritt

Ausführung B
Kompressionsärmel CH mit Schulter- und Haltegurt

Ausführung C
Kompressionsärmel CG

Ausführungen:



Vorbereitungen zum exakten Maßnehmen für Juzo® Kompressionsärmel

Bevor Sie die Maße ermitteln, zeichnen Sie bitte die Messpunkte an der **Arminnenseite** an.

Wichtig ist, immer im rechten Winkel zur Längsachse des Armes zu messen.

